



## Інструкція із застосування медичного виробу «ЛОРЕКТ спрей»

**ТОРГОВА НАЗВА:** ЛОРЕКТ спрей.

### СКЛАД

Натрію хлорид, вода очищена, продукти окислення жирних кислот (суміш карбонільних сполук).

### ОПИС

Прозора рідина від світло-жовтого до жовтого з коричнюватим відтінком кольору зі специфічним запахом. В процесі зберігання допускається поява осаду.

### ФОРМА ВИПУСКУ

Спрей. По 30 мл (ml) виробу у флакони зі спреї-насосом та насадкою-розпилювачем (допускається комплектація розпилювальними пристроями різної конструкції: назальною насадкою-розпилювачем і захисним ковпачком та оральною насадкою-розпилювачем; універсальною насадкою-розпилювачем та ін.).

Виробник залишає за собою право змінювати комплектність упаковки, що не впливає на споживчі властивості виробу.

### ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ЛОРЕКТ спрей являє собою ефективний антисептичний та антимікробний засіб природного походження, отриманий шляхом окислення жирних кислот за допомогою ізотонічного розчину натрію хлориду.

Джерелом жирних кислот є риб'ячий жир, який містить в своєму складі високий рівень мононенасичених і поліненасичених жирних кислот, а також вітаміни D<sub>3</sub>, A, E.

В ході процесу окислення жирних кислот утворюються карбонільні сполуки, що мають антимікробну активність відносно гноєрідної (піогенної) мікрофлори – синьогнійної палички, протей, кишкової палички, стафілококів. Така активність пов'язана з особливістю будови карбонільних сполук, що визначає їх здатність до інактивації багатьох ферментів мікробної клітини, що призводить до пригнічення життєво важливих метаболічних процесів в ній.

В результаті процесу окислення жирних кислот природним шляхом без додавання хімічних реагентів і оксидантів отримано ЛОРЕКТ спрей, який є єдиним, що містить суму карбонільних сполук, достатню для прояву необхідної антимікробної та антисептичної активності.

Наявність карбонільних сполук у присутності ізотонічного розчину натрію хлориду сприяє знищенню мікробів на слизовій оболонці носової та ротової порожнин, не порушуючи її нормальну мікрофлору; видаленню вірусів, бактерій і алергенів; зволоженню і очищенню слизової носа, видаляючи надлишковий слиз, скоринки і найдрібніші частинки після операцій без ризику кровотечі.

В результаті покращується функція миготливого епітелію, підсилюється опірність слизової оболонки ротової порожнини, порожнини носа і придаткових пазух до проникнення хвороботворних бактерій і вірусів, нормалізуються реологічні властивості слизу.

ЛОРЕКТ спрей допомагає відновити прохідність і нормальне функціонування верхніх дихальних шляхів, прискорює одужання при захворюваннях носоглотки і придаткових пазух носа.

Виріб не чинить фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

- для полегшення стану при гострих і хронічних запальних захворюваннях носоглотки, придаткових пазух носа, ротової порожнини різної етіології (риніти, синусити, тонзиліти (у тому числі ангіни), ларингіти, фарингіти, стоматити);

- у складі комплексного лікування і для профілактики гострих респіраторних захворювань;

- для санації слизової оболонки носа;

- для зменшення проявів місцевого запального процесу в носовій і ротовій порожнинах;

- для зволоження слизової оболонки носа та збереження її захисних фізіологічних властивостей в умовах підвищеної сухості повітря;

- у осіб, що страждають на часті риніти і синусити, регулярне використання виробу дозволяє скоротити частоту та термін застосування лікарських засобів;

- у складі комплексного лікування гіпертрофії аденоїдів, аденоїдиту.

### ПРОТИПОКАЗАННЯ

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів медичного виробу.

### ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

При зрощенні носової порожнини не закидати голову.

З метою уникнення поширення інфекції не рекомендується користуватися однією й тією ж насадкою кількома особам.

Одразу після застосування, а також у разі використання однієї і тієї ж насадки в носовій та ротовій порожнинах її слід обробити ватним тампоном, змоченим у 70° розчині етилового спирту або іншого антисептика.

Під час розпилювання медичного виробу слід уникати його потрапляння в очі.

*Застосування у дітей:* не застосовувати дітям віком до 1 року.

### СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед початком застосування слід порадитися з лікарем.

### **При застосуванні у носовій порожнині:**

Перед введенням ЛОРЕКТ спрею рекомендується звільнити носові ходи від слизу.

**При комплектації спреї-насосом та назальною насадкою-розпилювачем:** надіти на спреї-насос назальну насадку-розпилювач із захисним ковпачком. Зняти з насадки-розпилювача захисний ковпачок.

**При комплектації спреї-насосом з універсальною насадкою-розпилювачем:** повернути насадку-розпилювач отвором вгору. Після застосування насадку повернути у вихідне положення: отвором вниз.

Зробити пробне зрошення з метою визначення чутливості до виробу: тримаючи флакон вертикально, ввести насадку-розпилювач у один з носових ходів та здійснити 1 натискання.

ЛОРЕКТ спреї можна застосовувати у разі відсутності через 30 хвилин після застосування набряку слизової оболонки носу, утруднення дихання, слезотечі, чхання, свербіжу.

**Дорослим:** здійснювати 3-4 натискання на насадку-розпилювач у кожний носовий хід 3-4 рази на день.

**Дітям:** 1 натискання в кожний носовий хід 3-4 рази на день.

### **При застосуванні у ротовій порожнині:**

**При комплектації спреї-насосом та оральною насадкою-розпилювачем:** надіти на спреї-насос оральну насадку-розпилювач.

**При комплектації спреї-насосом з універсальною насадкою-розпилювачем:** повернути насадку-розпилювач отвором вбік. Після використання насадку повернути у вихідне положення: отвором вниз.

Зробити пробне зрошення з метою визначення чутливості до виробу: тримаючи флакон вертикально, ввести насадку-розпилювач у ротову порожнину та здійснити 1 натискання.

ЛОРЕКТ спреї можна застосовувати у разі відсутності через 30 хвилин після застосування набряку слизової оболонки, свербіжу, утруднення дихання, слезотечі.

**Дорослим:** здійснювати 3-4 натискання на насадку-розпилювач 3-4 рази на день.

**Дітям:** 1-2 натискання 3-4 рази на день.

### **ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ**

Можлива індивідуальна непереносимість, алергічні реакції.

### **УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ**

У захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Транспортувати всіма видами критого транспорту при температурі не вище 25 °С.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:** 2 роки. Необхідно використати до дати, зазначеної на упаковці.

### **ВИРОБНИК**

ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»

*Місцезнаходження юридичної особи:*

Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, Помірки, будинок 70.

*Адреса місця провадження діяльності:*

Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, Помірки-70, будинок б/н.

[www.biolik.com.ua](http://www.biolik.com.ua)

*У разі будь-якого серйозного інциденту, який трапився з виробом, або виникнення побічних реакцій при використанні виробу, просимо повідомляти виробнику будь-яким способом зв'язку: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, Помірки, будинок 70 або e-mail: [office@biolik.com.ua](mailto:office@biolik.com.ua)*

*При порушенні споживачем встановлених виробником умов зберігання та транспортування повідомлення розглядаються як необґрунтовані.*

### **ПОЯСНЕННЯ ДО СИМВОЛІВ**



«Виробник»



«Медичний вироб»



«Зберігати при температурі не вище 25 °С»



«Код партії»



«Дата виготовлення»



«Використати до»



«Користуйтеся інструкцією із застосування»



«Національний знак відповідності»

**Дата останнього перегляду:** 05.04.2023